

# equimix

## Fast & Ultra Fast Repair – Hoefwand reparatie, tijdelijke 'ijzers' en veulen extensies



In dit geval is de hoof geïnfecteerd met Laminitis. Verwijder loszittend vuil en maak de hoof schoon en goed droog.



Plaats de hoof op het stretchfolie en breng het Fast Repair product aan op de te repareren plekken.



Voordat de Fast Repair uithardt, moet de folie rond de hoof getrokken te worden. Zodoende wordt de hoof beschermt en krijgt het de goede vorm tijdens de uitharding.



Na 5 à 10 minuten, afhankelijk van de temperatuursomstandigheden (lagere temperaturen vertragen de uithardingstijd – gedurende de winter raden wij daarom de Ultra Fast Repair aan), kan de folie worden verwijderd. Een teveel aan Fast Repair kan nu worden weg gevijld. In dit geval, vanwege de Laminitis, hebben wij een deel van de hoof zichtbaar gelaten om het verloop van de ziekte in de gaten te kunnen houden.



Wanneer dit nodig is, kan er nog meer Fast Repair bovenop het uitgeharde Product worden aangebracht. Tevens het stretchfolie weer aanbrengen.



Na uitharding kan de folie worden verwijderd en een teveel aan Fast Repair worden weg gevijld om een correcte vorm van de hoof te verkrijgen.



Equimix Fast Repair en Ultra Fast Repair kunnen ook worden gebruikt om de hielhoek te wijzigen, tijdelijke 'ijzers' of veulen extensies te maken.

