

Pad

Pad is een vloeibare polyurethaan hoef pakking materiaal met een uithardingtijd van 25 seconden. Het zorgt voor een sterke, schokabsorberende en kussenachtige ondersteuning welke zijn vorm en flexibiliteit altijd behoud. **Pad** kan gebruikt worden met en zonder een leren/kunststof zool en houdt vocht en vuil buiten terwijl de zool en straal worden beschermd. Door **Pad** blijft de zool in een uitstekende conditie.

ALGEMENE INFORMATIE

- Voor de beste resultaten, gebruikt u de Equimix producten bij temperaturen tussen 18°-29°C.
- GÉÉEN natte, bloedende of geïnfecteerde delen afdekken.
- Het is aanbevolen gedurende het gebruik (wegwerp) handschoenen te dragen.
- Het product mag niet aan vuur blootgesteld worden.
- Alleen meegeleverde mengtuiten zijn geschikt om te gebruiken.

DUBBELSPUIT PROCEDURE

STAP 1: Om de dubbelspuit te openen verwijdert u de top met een tang en legt u de spuit in het pistool met het etiket naar boven.

STAP 2: Om ervoor te zorgen dat beide kanten van de dubbelspuit evenredig worden gebruikt, dient u voor het aanbrengen van de mengtuit, een kleine hoeveelheid product uit te drukken.

STAP 3: Bevestig de mengtuit door aan te drukken en tegelijkertijd met de klok mee te draaien.

STAP 4: Wanneer u klaar bent dient de mengtuit als afsluitdop op de dubbelspuit te blijven.

STAP 5: Wanneer u de dubbelspuit opnieuw wilt gebruiken, kunt u vanaf stap 2 beginnen met een nieuwe mengtuit.

HOEF PROCEDURE

STAP 1: Trim en vlak de zool. Vervolgens met een borstel schoonmaken.

STAP 2: Droog de hoef grondig met een heat gun of haarföhn. Pas op voor oververhitting!

Aandachtspunt: Als de hoef vet is, veeg dat deel af met een in ethanol (=gedenaturaliseerde alcohol) gedrenkte doek (afvegen NIET verzadigen). Daarna grondig drogen. Aceton mag NIET gebruikt worden.

WERKWIJZE

Met leren/kunststof zool

STAP 1: **Als er een opening is bij de hiel**, plaats de mengtuit onder de leren/kunststof zool en de hiel en vul de ruimte geheel op met Pad.

Als bovengenoemde opening er niet is: Boor van te voren een gat van 0.8 cm in de leren/kunststof zool naast de punt van de straal om vervolgens de hoef te beslaan. Positioneer de mengtuit op het gat en breng voldoende **Pad** aan achter de leren/kunststof zool. Bedek het gat met een stukje Duct Tape.

STAP 2: Na ongeveer 25 seconden kan de hoef worden losgelaten.

STAP 3: Vervang de mengtuit en herhaal dit proces zo vaak als nodig is.

Zonder leren/kunststof zool

STAP 1: Borstel de hoef goed schoon en droog deze grondig met een heat gun of haarföhn.

STAP 2: Snij een stukje gaas zo groot als de hoef af en plaats dit tussen de hoef en het ijzer; zorg ervoor dat gebogen zijde naar de kant van de hoef wijst.

STAP 3: Spijker het ijzer vast. Draai de hoef met de straal naar boven en breng **Pad** aan onder het gaas om de hoef op te vullen tot het gewenste niveau en tot in de punt van de hoef.

STAP 4: Voordat de hoef wordt losgelaten; ondersteun de hoef totdat **Pad** volledig is uitgehard, hetgeen ongeveer 25 seconden duurt.