

equimix

Hoof Pad – Ondersteuning en bescherming van de straal



Zorg er in ieder geval voor dat de holte van de straal schoon is en vrij van loszittend materiaal. Wees er zeker van dat er geen anaerobe bacteriën aanwezig zijn. In dat geval is er sprake van Laminitis, en zal de Hoof Pad Medium alleen aan de (onder) achterzijde van de hoof aangebracht moeten worden. Lijm of nagel het ijzer aan de hoof met een stukje gaas ertussen.



Blokkeer de toegang voor de lijm aan de voorzijde door bijvoorbeeld wat speelklei of soortgelijk materiaal aan te brengen.



Vul de holte door het gaas met Hoof Pad Medium.



Al na 1 minuut kan de klei worden verwijderd en de hoof op de grond geplaatst. Hoof Pad Medium ondersteund en beschermd de straal.



Hoof Pad kan ook gebruikt worden onder een leren zool. Maak de straal schoon en goed droog. Lijm of nagel het ijzer op de hoof met de leren zool, voorzien van 2 gaten ertussen.



Injecteer Pad medium of Soft door de gaten tussen de leren zool en de straal.



Equimix Hoof Pad is verkrijgbaar in 4 hardheden, van de zeer zachte Comfort (Shore A 20) tot de Hard (Shore A 70). Hoof Pad absorbeert schokken en dreunen, en geeft ondersteuning en bescherming voor plat-voetige of dun-zolige paarden. Hoof Pad houdt de straal in perfecte conditie.



Hard



Medium



Soft



Comfort